



FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Álcool 70° INPM SEFE MED Barbarex

REVISÃO: 01 / DATA: 02/03/2023

Descrição do Produto

O Álcool 70° INPM SEFE MED, é um produto formulado para ser utilizado como Desinfetante Hospitalar Para Superfícies Fixas e Artigos Não Críticos, produto exclusivamente de uso profissional.

Instruções de Uso

Superfícies Fixas: Lavar, enxaguar e secar as superfícies. Aplicar o produto puro e deixar agir por 10 minutos.

ARTIGOS NÃO CRÍTICOS: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergi-los no produto puro por 10 minutos ou friccionar o produto puro nos artigos, mantendo-os umedecidos por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utiliza-los o mais breve possível. Não utilizar em superfícies sensíveis ao álcool (superfícies enceradas, laqueadas, pintadas e envernizadas).

Propriedades Físico-Químicas

Aparência: Líquido - Cor: Incolor

Composição: Etanol, Desnaturante e Veículo.

Vantagens e benefícios

Bactericida, limpa e desinfeta;

Testado Dermatologicamente;

Mata 99,99% das bactérias.

Precauções

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Não ingerir. Evite inalação, aspiração e contato com os olhos. Evite o contato prolongado com a pele. Após utilizar o produto lave e seque as mãos. Se for ingerido não provoque vômito. Consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou um médico levando consigo o rótulo do produto. Não reutilize a embalagem.

PERIGO: PRODUTO INFLAMÁVEL.

Informações de Gerais

Armazenar o produto na sua embalagem original, em temperatura ambiente protegido do sol, fogo e calor. Manter longe dos alimentos.

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: MS Nº3.03.193-1

PRODUTO SANEANTE REGISTRADO MS Nº 3.3193.0038

Embalagens Disponíveis:

1L EAN: 7899449497150

5L EAN: 7899449498041

